



ANTIBUÉE – ANTIGLISSE – CONFORTABLE – REUTILISABLE – RECYCLABLE

Lunette de vue
ou protection

Plus de sécurité

Sans réajustement

Economique

Ecologique

FABRIQUE EN FRANCE

Le **SANBUÉ®** est un dispositif antibuée révolutionnaire. Il se fixe aussi bien sur les masques chirurgicaux que tissu (ajout d'une bande jersey en option recommandé).

Il est réutilisable et recyclable.

Le **SANBUÉ®** est réalisé en thermoplastique élastomère médical (ISO 10993).

Le **SANBUÉ®** est fabriqué en France à ARZAL dans le Morbihan (56).

Le **SANBUÉ®** est breveté et son modèle et sa marque sont déposés auprès de l'INPI.

Copié mais jamais égalé. Le **SANBUÉ®** a été testé durant de longues semaines dans différents secteurs d'activités comme l'agroalimentaire, l'industrie, le médical et paramédical, le scolaire et le tertiaire.

www.sanbue.fr



Qu'est ce que le **SANBUÉ®** ?

C'est un dispositif qui vient se fixer sur les masques pour assurer une étanchéité entre le haut du masque et le visage de son utilisateur.

Avec le **SANBUÉ®** plus de buée sur les lunettes de vue, de protection ou solaire.

Le **SANBUÉ®** à été conçu pour s'adapter sur les masques chirurgicaux et tissu.

Il est utilisable une quinzaine de jours sous réserve d'utilisation conforme.

Le **SANBUÉ®** permet également de porter son masque de manière optimale.

Equipé du **SANBUÉ®** le masque ne glisse plus sur le nez.

Le **SANBUÉ®** est fabriqué en matière médicale (ISO 10993).

Le **SANBUÉ®** a été pensé, développé et il est fabriqué en France à ARZAL dans le Morbihan (56).

Le **SANBUÉ®** est breveté à l'INPI.

Il s'adresse à tout le monde.



Pourquoi utiliser le SANBUÉ®

SANS SANBUÉ®	AVEC SANBUÉ®
	
Lunettes de protection, (vue , solaire) + Masque tissu	Lunettes de protection, (vue , solaire) + Masque tissu et SANBUÉ®
	
Lunettes de protection, (vue , solaire) + Masque chirurgical grand public	Lunettes de protection, (vue , solaire) + Masque chirurgical grand public et SANBUÉ®
Problème de vue, de port du masque donc de sécurité.	Vue dégagée, masque bien porté, sécurité augmentée.

Installation du SANBUÉ®

Pour les masques grands publics de type chirurgicaux :


1 - Après vous être lavé les mains, prenez un masque neuf et votre SANBUÉ®



2 - Placer le **SANBUÉ®** à l'intérieur du masque, sur le bord supérieur. Il convient de veiller à ce que les crochets soient bien agrippés au masque afin d'assurer un bon maintien et une bonne étanchéité



3 - Après l'avoir mis en place, créer une pliure en son centre pour qu'il vienne se placer sur l'arête du nez plus facilement.

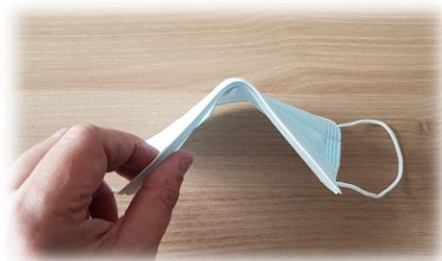


4 - Poser le masque et le **SANBUÉ®** sur le nez. Le mettre en forme sur votre visage , vos pommettes. Une fois bien positionné, vous n'aurez plus de buée sur vos lunettes de vue (de protection).



5 - Pour changer de masque. Oter le **SANBUÉ®** en le « déscrachant » délicatement du masque.
Nettoyer* votre **SANBUÉ®** sans l'aplatir.



6 - Repositionner le **SANBUÉ®** formé sur le nouveau masque. Assurez vous qu'il soit bien agrippé au masque.

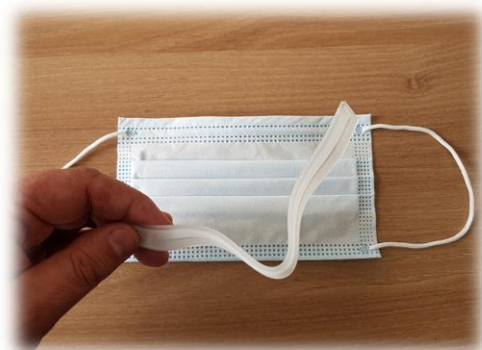

7 – Positionner le nouveau masque sur votre visage pour profiter du **SANBUÉ®**.



Scanner le QR Code pour visualiser la vidéo de démonstration.



**Nettoyage:*

Utilisation de solution désinfectante. Vérifier le contact peau de votre produit. Ne pas plonger dans l'eau ou mettre à la machine à laver.

Pour les masques tissu:

1 – Nous recommandons de coudre ou coller à l'intérieur de votre masque, sur le bord supérieur, une bande de boucles jersey (**Option**).



2 - Après vous être lavé les mains, placer le **SANBUÉ®** sur la partie cousue. Veiller à ce que les crochets soient bien agrippés à la bande afin d'assurer un bon maintien et une bonne étanchéité.



3 - Après l'avoir mis en place, créer une pliure en son centre pour qu'il vienne se placer sur l'arête du nez plus facilement.



4 - Poser le masque et le **SANBUÉ®** sur le nez. Le mettre en forme sur votre visage, vos pommettes. Une fois bien positionné vous n'aurez plus de buée sur vos lunettes de vue ou de protection.



5 - Après utilisation, une journée d'utilisation, vous pouvez nettoyer* le SANBUÉ® avant de le mettre sur un nouveau masque propre. Ne pas remettre le SANBUÉ® à plat. Laissez le en forme.

**Nettoyage:*

Utilisation de solution désinfectante. Vérifier le contact peau de votre produit. Ne pas plonger dans l'eau ou mettre à la machine à laver.

Scanner le QR Code pour visualiser la vidéo de démonstration.





Infos et renseignements : contact@sanbue.fr

www.sanbue.fr

